

# ■ C47A 夏マスクA (夏らくマスク)



株式会社 モリモト医薬、CMC医薬

\* CMC医薬はモリモト医薬の子会社です。

# 製品概要

商品名：飛沫防止簡易マスク（夏マスクA 夏らくマスク）

サイズ：全幅315mm、全高105mm、中央幅145mm、穴直径55mm

素材：PET 100%スパンレース不織布（1層）

包装単位：30枚/袋

ラベル記載内容：

90枚入  
(30枚×3袋)

熱中症対策に最適!

夏マスクの決定版!

**夏らくマスク**

- 呼吸しやすい
- 高いフィット感(密着性)
- 耳が痛くない
- 小さくたためる
- 薄くて軽い
- 二重重ね可

サイズ: 全幅 315mm 全高 105mm 中央幅 145mm 穴直径 55mm  
素材: PET 100% スパンレース不織布

販売者 株式会社 CMC 医薬 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島 5-8-28 TEL: 06-6476-5473 FAX: 06-6476-5573

# ■ 特長と使用上の注意


## 特長：

- \* 一層構造で空気が通りやすいので、暑さによる蒸れや息苦しさが少ない。
- \* 耳が痛くならない。
- \* 薄くて軽い。
- \* マスク本体が伸縮して、顔にピッタリとフィットする。
- \* 布マスクより濾過効率が高く、唾液の飛沫を防止する（次ページの試験結果を参照）。
- \* 折りたたんで、眼鏡ケースやティッシュ入れに収納し、携行できる。
- \* 二枚重ねでも使用できる。

## 使用上の注意：

1. 着用時：まず本体の左右どちらかの穴を耳に掛けて、マスクを押さえながら反対の耳側に少し伸ばし、もう片方の耳に掛ける。
2. 脱着時：ゆっくりと片方の耳から外してください。左右同時に外すと、伸びてしまい、飛沫予防効果が薄れます。
3. マスクに水分を含んだ状態での使用は避け、乾燥した状態で使用してください。
4. 1枚1日程度の使用時間とし、使用後は可燃ごみとして廃棄してください。

# 各種マスクの粒子透過試験

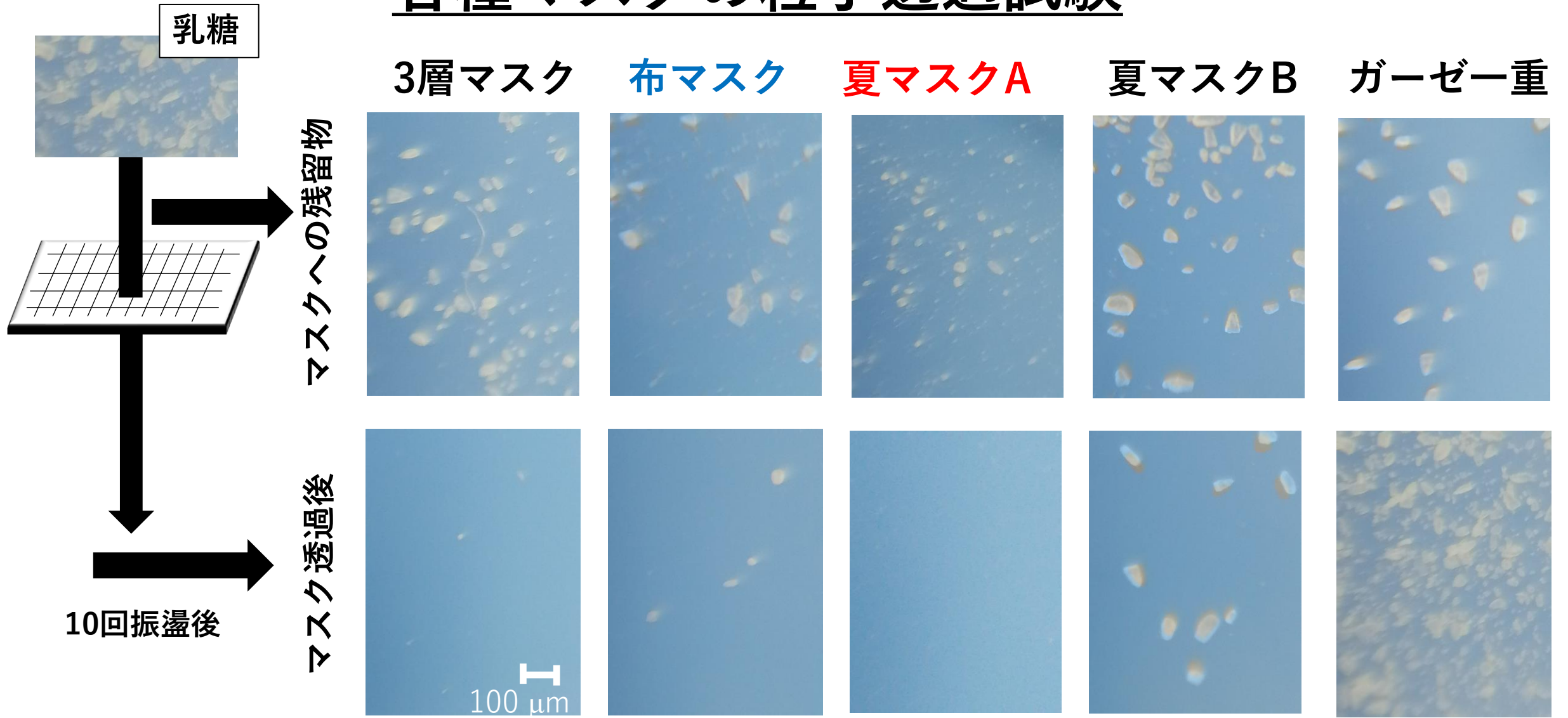

・夏マスクAは布マスクに比べて微粒子濾過性能に優れている。

# 飛沫(スプレーミスト)透過試験




コーヒー2回噴霧

夏マスクA

夏マスクB

防御無し

ガーゼ

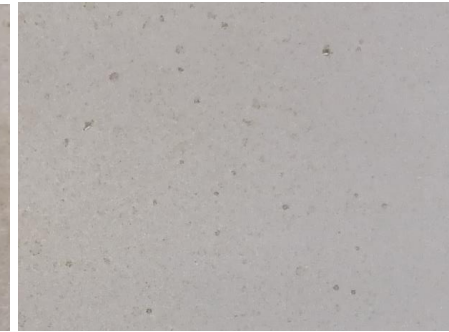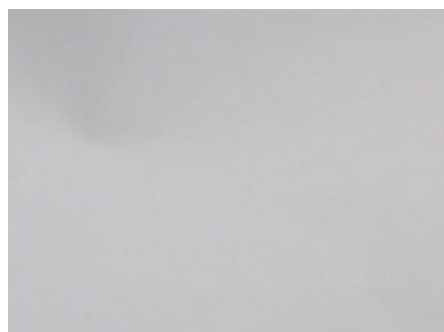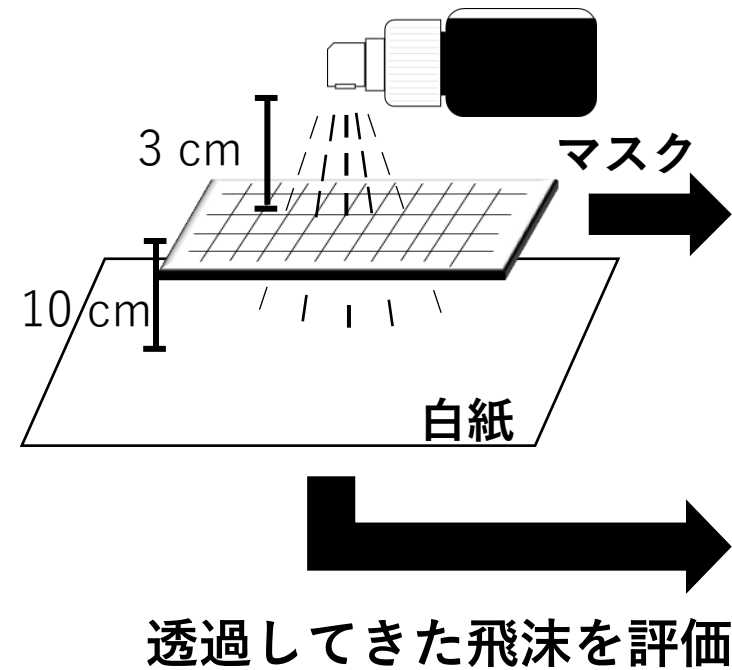

**夏マスクAは飛沫を吸収し、通さない。**